


Łatwe zastosowanie:


Inhalacja przy użyciu inhalatora Easyhaler® krok po kroku.

1

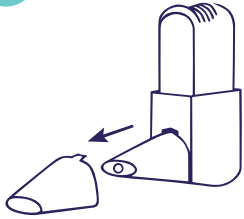


- Zdjąć nasadkę z ustnika

2

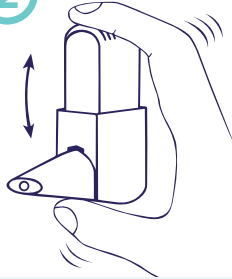


- Energicznie wstrząsnąć inhalatorem Easyhaler® 3-5 razy

3

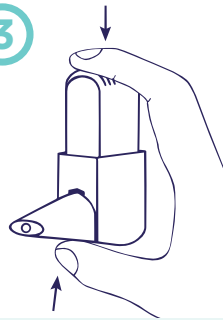

- Urządzenie trzymać w pozycji pionowej
- Trzymając między kciukiem a palcem wskazującym nacisnąć mocno jeden raz do usłyszenia kliknięcia
- Następnie inhalator powraca do pozycji wyjściowej

4

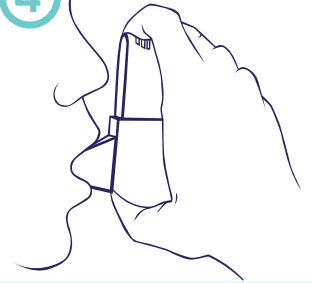

- Wykonać normalny wydech (ale NIE do inhalatora Easyhaler®)
- Objąć inhalator Easyhaler® szczelnie wargami.
- Wykonać mocny i głęboki wdech przez inhalator Easyhaler®
- Wyjąć urządzenie i na 5 sekund wstrzymać oddech.
- Następnie wyjąć inhalator z ust i wykonać wydech.
- Nałożyć nasadkę na ustnik.


Jeśli lekarz zalecił więcej niż jedną dawkę na jedno zastosowanie, należy powtórzyć kroki 2-4.

! Aby zmniejszyć ryzyko infekcji grzybiczej, należy wypłukać jamę ustną i gardło wodą, NIE połykając wody.

Stan licznika

Inhalator Easyhaler® jest wyposażony w licznik, który wskazuje, ile pojedynczych dawek pozostało jeszcze w inhalatorze.


- Po każdym 5 zastosowaniach licznik przesuwają się dalej.
- Kolor czerwony sygnalizuje: pozostało już tylko 20 pojedynczych dawek.
- Gdy licznik wskazuje 0, konieczna jest wymiana inhalatora Easyhaler®.

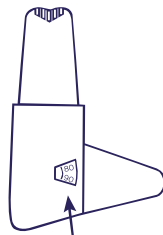

Opakowanie ochronne

Inhalatora Easyhaler® NIE TRZEBA wyjmować z opakowania ochronnego przed inhalacją.

- Otworzyć opakowanie.
- Zdjąć osłonkę z ustnika.
- Wykonać inhalację, jak opisano w punktach 2 do 4.
- Nasadzić osłonkę na ustnik.
- Zamknąć opakowanie ochronne.

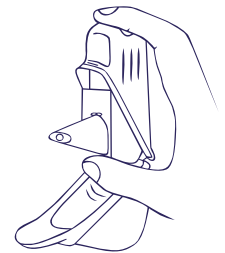


W przypadku nieprawidłowego zastosowania

Technika zastosowana w inhalatorze Easyhaler® wyklucza zażycie podwójnej dawki

Jeśli...

- inhalator Easyhaler® był przypadkowo załadowany,
- inhalator Easyhaler® był uruchomiony więcej niż jeden raz,
- wykonano wydech do urządzenia,

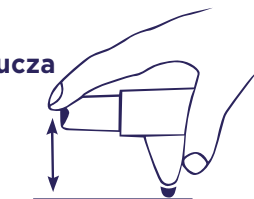

to...

- należy wstrząsnąć zawartość inhalatora Easyhaler® z ustnikiem na blat stołu lub na dłoń.

Więcej informacji pod adresem:
www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Notkestraße 9 · 22607 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de

 Manufactured in Finland

ORION PHARMA

EASYHALER