


Fácil de utilizar:

Uso correcto del Easyhaler®. Pasos a seguir.


1

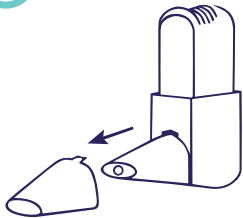

- Destape la boquilla

Agitar

2

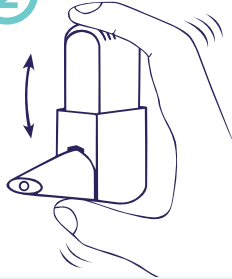

- Agite el Easyhaler® vigorosamente de 3 a 5 veces

Oprimir


3



- Mantenga el inhalador en posición vertical
- Presione el inhalador fuertemente, una sola vez, entre el pulgar y el índice, hasta oír un „clic“
- Seguidamente, déjelo que recupere su posición inicial

Inhalar

4

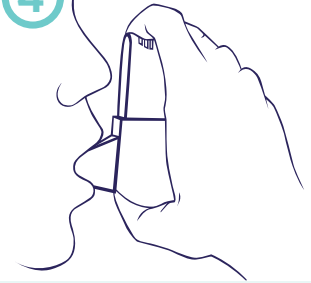

- Expire normalmente (pero NO en el Easyhaler®)
- Selle bien los labios alrededor de la boquilla del Easyhaler®
- Inspire fuerte y profundamente a través del Easyhaler®
- Retire el inhalador de la boca y mantenga la respiración durante 5 segundos
- A continuación, exhale fuera del aparato
- Tape de nuevo la boquilla


Si le han recetado más de una dosis por vez, repita los pasos de 2 a 4.

Para minimizar el riesgo de una infección por hongos, enjuague la boca y haga gárgaras con agua después del uso. Atención a NO tragar el agua.

Estado del contador

El Easyhaler® dispone de un mecanismo contador que indica el número de dosis individuales disponibles todavía.


- El estado del contador avanza tras cada quinta administración.
- La marca roja indica que en el inhalador quedan sólo 20 dosis individuales
- Cuando el contador esté en „0“ debe sustituir el Easyhaler®.

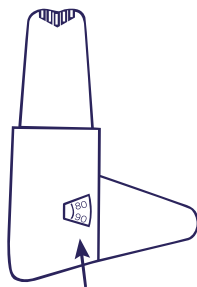

Si utiliza una caja protectora

NO sacar el Easyhaler® de la caja protectora para inhalar.

- Abrir la caja protectora
- Quitar la tapa de la boquilla
- Inhalar como se describe en los pasos 2 a 4
- Colocar la tapa en la boquilla
- Cerrar la caja protectora

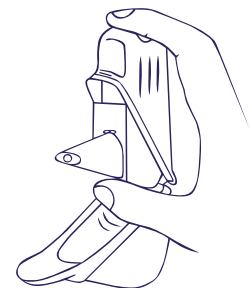

Uso incorrecto


La técnica del Easyhaler® impide duplicar la dosis.

Qué hacer si...

- cargó fortuitamente el Easyhaler®
- oprimió el Easyhaler® más de una vez
- expiró en el inhalador

En estos casos...

- golpee el Easyhaler® con la boquilla sobre una mesa o sobre la palma de la mano

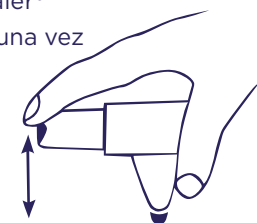

Para más información, véase www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Notkestraße 9 · 22607 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

ORION PHARMA