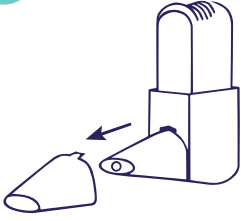
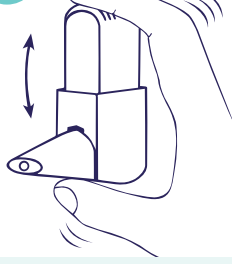


Kolay kullanım:


Easyhaler® cihazıyla adım adım enhalasyon.

1


- Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkartın

2

- Easyhaler® cihazını 3 ilâ 5 kez kuvvetle çalkalayın

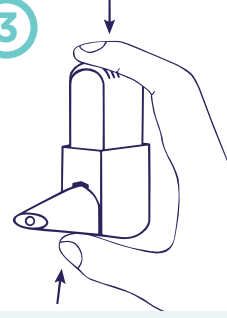3

- Cihazı dikey olarak tutun
- Tık sesi gelinceye kadar başparmağınızla işaret parmağınız arasında bir kez kuvvetle sıkıştırın
- Ardından bırakın, başlangıç konumuna geri dönsün

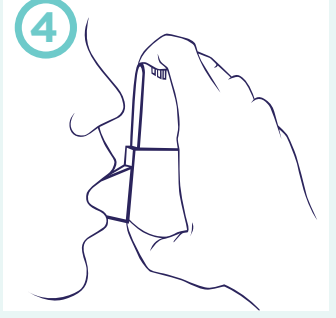4

- Normal bir şekilde soluk verin (Easyhaler® cihazının içine DEĞİL)
- Easyhaler® cihazını dudaklarınızın arasına alın
- Easyhaler® cihazının içinden güçlü ve derin bir şekilde soluk alın
- Cihazı ağızınızdan çıkartıp 5 saniye nefesinizi tutun
- Ardından cihazın yanından nefes verin
- Koruyucu kapağı ağızlığa takın


Doktorunuz tarafından her kullanım için birden çok doz yazılmışsa, 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

! Mantar enfeksiyonu riskini azaltmak için, ağızınızı ve boğazınızı, YUTMAKSIZIN suyla çalkalayın.

Sayaç

Easyhaler® cihazında, kaç doz kaldığını gösteren bir sayaç vardır.


- Sayaç, 5 kullanımda bir atar
- Kırmızı işaret, sadece 20 doz kaldığını gösterir
- Sayaç 0'a geldiğinde, Easyhaler® cihazının değiştirilmesi gerekir

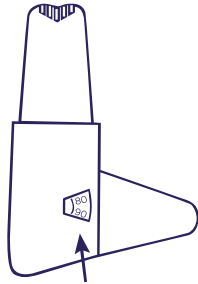

Bir koruyucu kutu kullanıyorsanız

Easyhaler'in®, inhalasyon için koruyucu kutudan çıkarılmasına gerek YOKTUR.

- Koruyucu kutuyu açın
- Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkarın
- 2–4. adımlarda açıklandığı gibi içinize çekin
- Koruyucu kapağı ağızlığa takın
- Koruyucu kutuyu kapatın

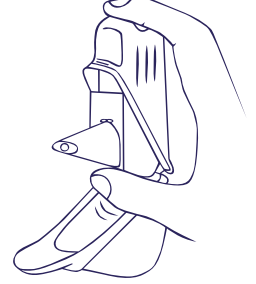

Yanlış kullanım durumunda


Easyhaler® teknolojisi, çift dozajı önler!

Şu durumlarda:

- Easyhaler® yanlışlıkla doldurulduysa
- Easyhaler® birden çok kez çalıştırıldıysa
- Cihazın içine soluk verildiyse

Şunu yapın:

- Easyhaler® cihazının ağızlığını masaya veya elinize vurun

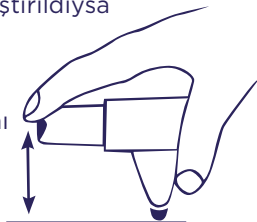

Daha fazla bilgi için bkz.
www.easyhaler.de

