


ደረጃታት መሰርሕ ምጥቓም ምስትንፋስ መሰርሒ መተንፈሲ®


ጎጽጉጾ(ሕቆኖ)

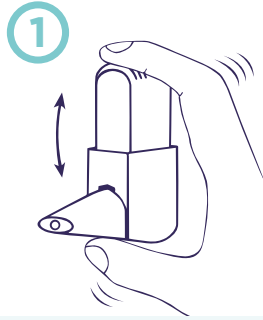

- ካብቲ ኣፋ ናይቲ መተንፈሲ መሰርሒ እታ መክደኒት ክፈታ


- ነቲ ናይ መሰርሒ Easyhaler® ኣበርቲዕካ ካብ 3 ክሳብ 5 ጊዜ ዝኸውን ጎጽጉጾ(ሕቆኖ)

ጣዕ(ምጽቃጥ)

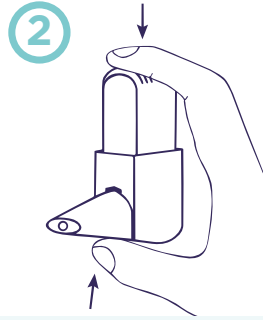

- ነቲ ናይ መሰርሒ መተንፈሲ ንላዕሊ ገጽካ ሕዞ
- ቦታ ዓባይ ዓባይት ኣጸብዕትኻ ካብቲ ታሕተዋይ ክፋል ቦታ መመልከቲት ኣጸብዕትኻ ድማ ቦቲ ላዕለዋይ ክፋል ክሳብ ጣዕ ዝብል ድምጺ ትሰምዕ ጽቀጦ
- ቀጺልካ ባዕላ ጣዕ ኢላ ናብ ቦትኣ ክሳብ ትምለስ ተጸብያ

ንውሽጢ ምስሓብ (ምስትንፋስ)

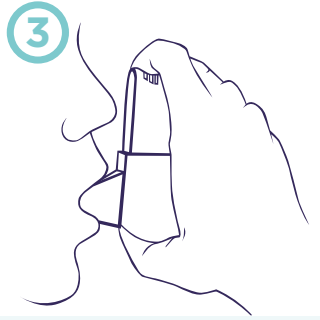

- ከም ንቡር ኹንካ ንደገ
- ኣስተንፍስ(እንተኹን ግን ናብታ መሰርሒ Easyhaler® ኣይተስተንፍስ)
- ኣብ ከባቢ ናይታ መሰርሒ Easyhaler® ከንፈርካ ኣጸቢቕኻ ዕጸዎ
- ነቲ ናይ መሰርሒ Easyhaler® ተጠቂምካ ዓሚቕን ቀጻልን ዝኾነ ምስትንፋስ ኣስተንፍስ
- ድሕሪኡ ኣብ ጥቕቲ መሰርሒ ኣየር ኣውጽኡ
- ነታ መኸደኒት ናይታ ኣፋ ናይቲ መተንፈሲ መሰርሒ ናብ ቦትኣ ምለሳ


እንድሕር ደኣ ካብ ሓደ ጊዜ ንላዕሊ ንክትጥቆም ብሕክምና ተነጋርካ ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ደረጃ እንደገና ተጠቀም

- ! ረኽሱ ናይ ፋንጋስ ኣብ ኣፍካ ንምቕናስ፡ ኣፍካ ብደምቢ ማይ ጌርካ ጎጽጉጾ፡ ነቲ ማይ ድማ ኣይትውሓጦ

ቆጻሪት

እቲ ናይ መሰርሒ Easyhaler® ቆጻሪት ክንደይ ሓሓደ ዓቕን ምትንፋስ ከምዝተረፈ የርእየካ እዩ።


- እቲ ቆጻሪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ምጥቃም ይሕብር
- እቲ ቁጽርታት ናብ ቀይሕ ምስ ተቐየረ፡ 20 ነፍይ ሓደ ዓቕን ከምዝተረፈ ይሕብር
- እቲ ቆጻሪ 0 ምስ በጽሐ፡ እቲ ናይ መሰርሒ መተንፈሲ® ክትቅይሮ ኣለካ

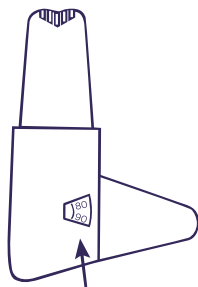

መከላኸሊ ሰፈር እንተ ትጥቆምሉ

ነቲ Easyhaler® ብሰንኪ ንውሽጢ ምስትንፋስ ካብቲ መከላኸሊ ሰፈር ኣይተውጽዎ ኢኹም።

- ነቲ መከላኸሊ ሰፈር ክፈትዎ
- ነቲ መከላኸሊ ቁብዕ ካብቲ ክፋል ኣፍ ኣልግስዎ
- ከምቲ ኣብ ስጉሚታት 1 ክሳብ 3 ዝተገልጸ ንውሽጢ ምስትንፋስ
- እቲ መከላኸሊ ቁብዕ ኣብቲ ክፋል ኣፍ ምለስዎ
- ነቲ መከላኸሊ ሰፈር ዕጸውዎ

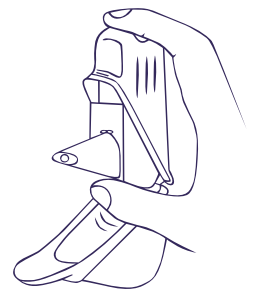

ኣብ ግጉይ ኣጠቓቕማ


ናይ Easyhaler® ኣሰራርሓ፡ ድርብ ጊዜ ብሓንጎሩ ምእንቲ ከይወጽእ ይውግድ እዩ!

እንድሕር ደኣ...

- ነቲ መሰርሒ Easyhaler® ብድንገት መለእካዮ
- ነቲ መሰርሒ Easyhaler® ካብ ሓደ ጊዜ ንላዕሊ ጸቂጥካዮ/ክዮ

• ናብቲ ናይ መሰርሒ መተንፈሲ ሲዒልካ ሽው...

- ነቲ ኣፍ ናይቲ መሰርሒ Easyhaler® ናብ ጣውላ ወይ ናብ ኢድካ ጠብጥቦ

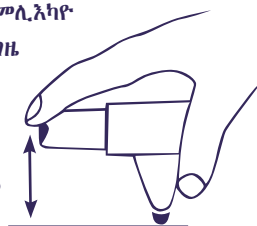

ተወሰኹቲ ሓበሬታታት ኣብ ዝሰዕብ ክትረኽቡ፡ www.easyhaler.de

