


使用方法は簡単です：


Easyhaler® による吸入方法をステップごとに説明します。

よく振る

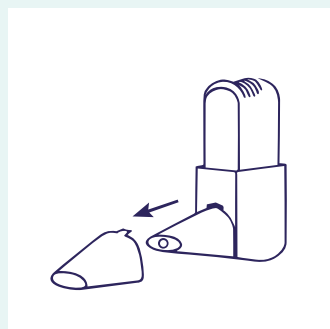


- マウスピースから保護キャップを外します

①

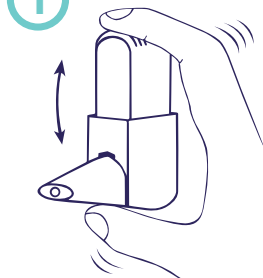


- Easyhaler® を縦に3〜5回よく振ります

押し込む (装填)

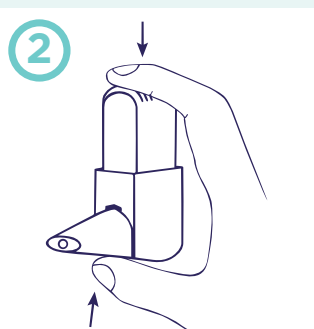

- 吸引器をまっすぐに立てて持ちます
- 吸引器を親指と人差し指ではさみ、カチッと音がするまで、両方の指で一回強く押し込みます
- 指の力を抜き、吸引器を元の状態に戻します

吸入する

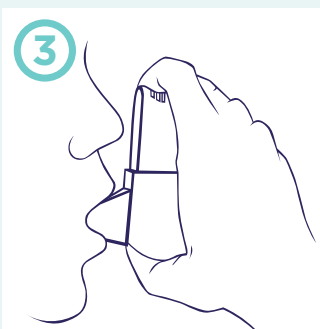

- 普通に息を吐き出します (Easyhaler® に息を吹き込まないでください)
- Easyhaler® を唇でしっかりとはさんでくわえます
- Easyhaler® をくわえたまま、(薬剤を) 深く吸い込みます
- 吸引器を口から離し、5秒間息を止めます
- そして (吸引器を口から離れたまま) 息を吐き出します
- マウスピースに保護キャップを取り付けます


一度の使用で2回以上の吸引を指示されている場合は、手順1から3を繰り返します。

真菌感染のリスクを低減するため、(吸入後は) 水で口をすすぎ、うがいをしてください (水を飲み込まないこと)。

カウンター表示

Easyhaler® には、残り装填数を示すカウンターがついています。


- 5回の装填ごとに、カウンターが進みます
- カウンターが赤になると、残り装填数は20回です
- カウンターが「0」を示したら、新しいEasyhaler® をご使用ください

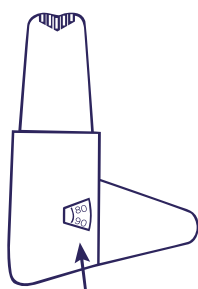

保護ボックスをご利用の場合

吸引の際、Easyhaler® を保護ボックスから取り出す必要はありません。

- 保護ボックスを開きます
- マウスピースから保護キャップを外します
- 手順1〜3の説明に従い、吸引します
- マウスピースに保護キャップを取り付けます
- 保護ボックスを閉めます

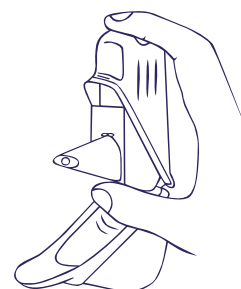

誤使用を防ぐために


Easyhaler® には、過剰な量の薬の吸引を防ぐ技術が採用されています！

万一、以下のようなことが起きたら、

- Easyhaler® を誤って装填した
- 吸引器内に息を吹き込んだ

次のように対応してください

- Easyhaler® のマウスピースをテーブルの上、または手のひらにのせ、コンコンと叩いて、内容物をだします

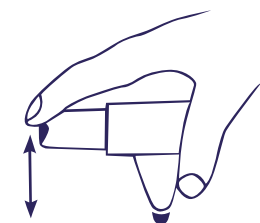

詳細に関しては www.easyhaler.de をご参照ください



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg

電話 +49-40-89 96 89-0

info-hamburg@orionpharma.com

www.orionpharma.de