





Fácil utilização:

A inalação com o Easyhaler® passo a passo.

Agitar

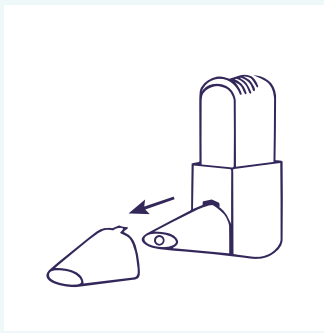


- Remover a capa protetora do bocal

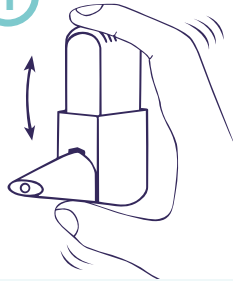1


- Agitar fortemente o Easyhaler® 3 a 5 vezes na vertical

Clicar

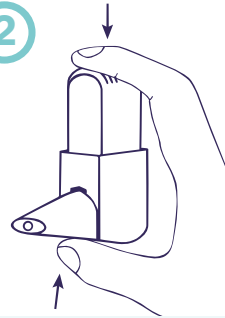2

- Manter o aparelho na vertical
- Pressionar uma vez com força entre o polegar e o dedo indicador até ouvir um clique
- De seguida, deixar deslizar para trás para a posição inicial

Inalar

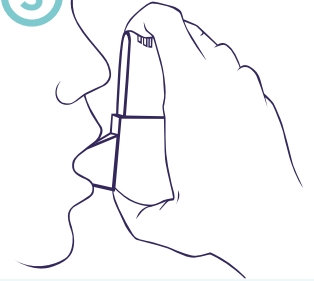3

- Expirar normalmente (mas NÃO para o Easyhaler®)
- Envolver o Easyhaler® com firmeza com os lábios
- Inspirar fundo pelo Easyhaler®
- Afastar o aparelho e reter a respiração durante 5 segundos
- A seguir, expirar ao lado do aparelho
- Encaixar a capa protetora no bocal


Se lhe tiver sido prescrita mais do que uma dose por utilização, repita os passos de 1 a 3.

- ▶ Para reduzir o risco de infeção por fungos, enxague a boca e a garganta com água
- SEM engolir.

O contador

O Easyhaler® tem um contador, que mostra quantas doses individuais ainda tem.


- O contador avança após cada 5.ª utilização
- Marca vermelha sinaliza: ainda tem 20 doses individuais
- Quando o contador está em 0, tem de substituir o Easyhaler®

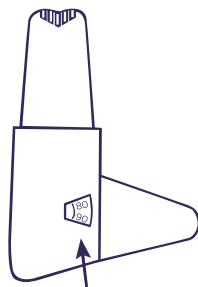

Se usar uma caixa de proteção

O Easyhaler® NÃO tem de ser retirado da caixa de proteção para ser inalado.

- Abrir caixa de proteção
- Remover a capa protetora do bocal
- Inalar conforme descrito nos passos 1 a 3
- Encaixar a capa protetora no bocal
- Fechar caixa de proteção

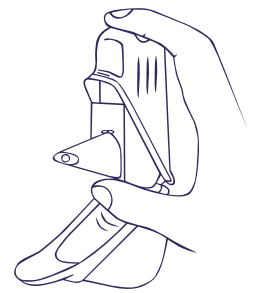

Em caso de utilização incorreta

A tecnologia do Easyhaler® impede uma dosagem dupla!

Se...

- o Easyhaler® foi acidentalmente carregado
- expirou para o aparelho

Então...

- bater com o bocal do Easyhaler® sobre uma superfície de mesa ou contra a mão



Mais informações em: www.easyhaler.de



ORION Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Str. 46 · 22763 Hamburg
Fon 040-899689-0
info-hamburg@orionpharma.com
www.orionpharma.de



Manufactured in Finland

ORION
PHARMA