


يرجى قراءة النشرة الموجودة في عبوة جهاز Easyhaler لمزيد من المعلومات. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية، فيرجى طلب المشورة من أخصائي الرعاية الصحية.

إذا تم وصف أكثر من جرعة واحدة لكل مرة استخدام، فكرر الخطوات من 2 إلى 4.  
أخيرًا استبدل غطاء السلامة الموجود على الجزء الذي يوضع بالفم.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فعليك...

- قم بتفريغ الجزء الذي يوضع في الفم من جهاز Easyhaler على طاولة أو على يدك

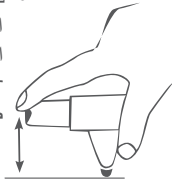

إذا...


- قمت بتحميل Easyhaler بدون قصد
- ضغطت على جهاز الاستنشاق لأكثر من مرة
- نفخت في جهاز الاستنشاق

بعد تعاطي الجرعات باستخدام كورتيكوستيرويد يتم استنشاقه (الوافي)

لتقليل مخاطر حدوث عدوى فطرية، يجب شطف الفم والحلق بالماء ثم بصق الماء، ويجب عدم بلعه.


2

الهز

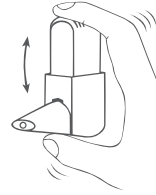

قم بهزّ جهاز Easyhaler بقوة بعدد 3 إلى 5 مرات


1

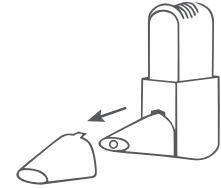

أزل الغطاء الواقي من الغبار من الجزء الذي يوضع في الفم

4


الاستنشاق

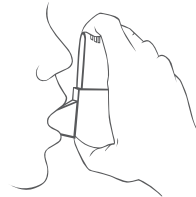

- تنفس بصورة طبيعية (لكن لا تننفس في Easyhaler)
- ضع الجزء الذي يوضع في الفم بين الأسنان وأغلق الشفتين حوله بإحكام
- خذ نفسًا قويًا وعميقًا قدر الإمكان
- أخرج جهاز الاستنشاق واحبس أنفاسك لمدة 5 ثوانٍ (لا يلزم ذلك لجميع أجهزة Easyhaler - يرجى التحقق من المعلومات المذكورة في العبوة)

3

الضغط

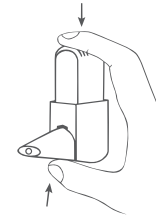

- ثبتّ جهاز الاستنشاق في وضع قائم
- اضغط بقوة بين إصبع الإبهام عند القاعدة وإصبع السبابة في الأعلى، حتى تسمع صوت طقطقة
- ثم دعه يعود إلى موضعه الأصلي

## متى ينبغي استبدال جهاز Easyhaler؟

تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوع على العبوة، يجب عدم استخدام جهاز Easyhaler بعد هذا التاريخ.

ستوضح النشرة الموجودة داخل العبوة المدة الزمنية التي يمكن خلالها استخدام الجهاز بمجرد فتح الرقاقة المعدنية. يجب تدوين التاريخ عند فتح الرقاقة لمساعدتك في تذكره.

## التنظيف

قم بتنظيف الجزء الذي يوضع في الفم مرة واحدة على الأقل كل أسبوع باستخدام قماش جاف أو منديل ورقي.

يجب عدم استخدام الماء أو السوائل الأخرى.

## الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، فيجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني أو الممرضة. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في النشرة الموجودة داخل العبوة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام "مخطط البطاقة الصفراء" على الموقع الإلكتروني: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)

ومن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك توفير معلومات إضافية عن سلامة الدواء.




Orion Pharma (UK) Ltd,  
Abbey Gardens,  
4 Abbey Street,  
Reading, RG1 3BA, UK

## إذا كنت تستخدم غطاءً واقياً

يمكن وضع جهاز Easyhaler في غطاءً واقٍ لحمايته من الرطوبة.

وعند الاحتفاظ بجهاز Easyhaler في غطاءً واقٍ، افتح الغطاء واتبع الخطوات من 1 إلى 4 في الصفحة التالية، ثم أغلق الغطاء.


يرجى الاتصال بفريق المعلومات الطبية على الرقم 01635 520300 لطلب الحصول على غطاءً واقٍ لجهاز Easyhaler.

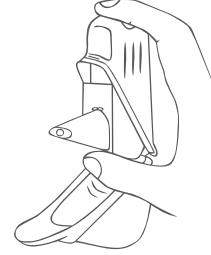

## العداد

يحتوي Easyhaler على عداد يعرض عدد الجرعات الفردية المتبقية في جهاز الاستنشاق.

- والعداد يتحرك بعد كل 5 جرعات فردية
- وعندما تتحول الأرقام إلى اللون الأحمر، فهذا يعني أنه يتبقى 20 جرعة فردية فقط، وعندئذ تكون بحاجة إلى طلب وصفة جديدة لجهاز Easyhaler جديد.
- وعندما يصل العداد إلى الرقم 0، قم بتغيير الجهاز واستخدام جهاز Easyhaler جديد، وسيظل قدر صغير من المسحوق في جهاز الاستنشاق الفارغ، والذي يجب عدم استخدامه.

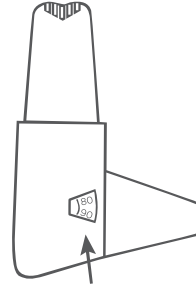

## فيديو تعليمي عن جهاز EASYHALER

يمكنك مسح رمز QR أو زيارة موقعنا على شبكة الويب المدون على العلبة الكرتونية لجهاز Easyhaler أو النشرة الموجودة داخل العبوة أو ملصق جهاز الاستنشاق لمشاهدة فيديو حول كيفية استخدام الجهاز. وبالنسبة إلى منتجات Easyhaler ذات العبوات التي لا يوجد عليها رمز QR أو موقع ويب، تفضل زيارة [www.oeh.fi/uk](http://www.oeh.fi/uk) للوصول إلى الفيديو.