

Jak używać Easyhaler®


Polish

ORION
PHARMA

MARCH 2021/EASYH-413h(1)

Więcej informacji zawiera ulotka dołączona do opakowania Easyhaler. Dodatkową pomoc można uzyskać u pracownika opieki zdrowotnej.


1

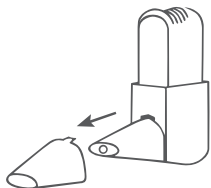

Zdjąć nasadkę przeciwpływową z ustnika

2


Wstrząsnąć

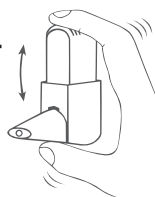

Energicznie wstrząsnąć Easyhaler 3 do 5 razy

3


Kliknąć

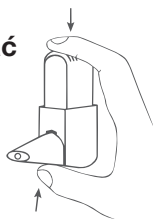

- Trzymać inhalator pionowo
- Ścisnąć mocno trzymając kciuk u podstawy a palec wskazujący u góry, aż będzie słychać kliknięcie
- Następnie poczekać na kolejne kliknięcie i powrót inhalatora do pierwotnej pozycji

4

Wziąć wdech

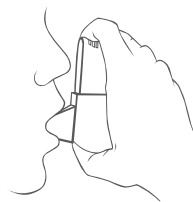

- Należy wykonać normalny wydech (ale NIE do inhalatora Easyhaler)
- Umieścić ustnik między zębami i zacisnąć wokół niego usta
- Wziąć możliwie mocny i głęboki wdech
- Wyjąć inhalator i wstrzymać oddech na 5 sekund (nie jest to wymagane w przypadku wszystkich inhalatorów Easyhaler - sprawdzić informacje w opakowaniu)

Jeśli zgodnie z zaleceniami ma być jednorazowo podawana więcej niż jedna dawka, należy powtórzyć kroki od 2 do 4.

Na koniec założyć nasadkę zabezpieczającą na ustnik.


Rozwiązywanie problemów

Jeżeli...

- przypadkowo załadowano Easyhaler
- należy nacisnąć Easyhaler więcej niż jeden raz
- dmuchnąć do inhalatora

Następnie...

- postukać ustnikiem inhalatora Easyhaler o stół lub dłoń

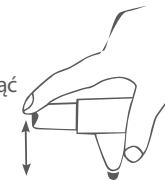

Po podaniu wziewnego kortykosteroidu (leku stosowanego zapobiegawczo)


Aby zmniejszyć ryzyko infekcji grzybiczej, przepłukać jamę ustną i gardło wodą, którą należy następnie wypłuć, nie połykać.

W przypadku użycia pokrowca ochronnego

Easyhaler można umieścić w pokrowcu ochronnym, aby chronić go przed wilgocią.

W przypadku przechowywania inhalatora Easyhaler w pokrowcu ochronnym, należy otworzyć opakowanie i wykonać kroki od 1 do 4 opisane na następnej stronie, a następnie zamknąć pokrowiec.


Należy skontaktować się z zespołem ds. informacji medycznych pod numerem 01635 520300, aby zamówić pokrowiec ochronny do inhalatora Easyhaler.

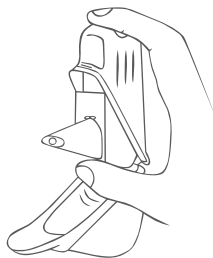

Licznik

Easyhaler jest wyposażony w licznik pokazujący, ile pojedynczych dawek pozostało w inhalatorze.

- Licznik przesuwają się po każdym 5 pojedynczych dawkach
- Gdy cyfry zmieniają kolor na czerwony, oznacza to, że pozostało tylko 20 pojedynczych dawek i wtedy należy poprosić o nową receptę na nowy inhalator Easyhaler.
- Kiedy licznik wskaże 0, należy zmienić inhalator na nowy inhalator Easyhaler, w pustym inhalatorze pozostanie niewielka ilość proszku, którego nie należy używać.

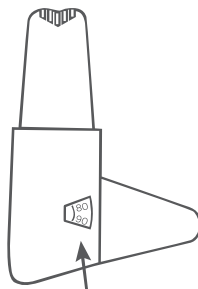

Kiedy należy wymienić Easyhaler?

Data ważności jest nadrukowana na opakowaniu, nie należy używać inhalatora Easyhaler po jej upływie.

Ulotka dla pacjenta zawiera informacje, jak długo można używać wyrobu po otwarciu foliowej saszetki. Należy zapisać datę otwarcia saszetki, aby jej nie zapomnieć.

Czyszczenie

Co najmniej raz w tygodniu należy czyścić ustnik czystą, suchą szmatką lub chusteczką.

NIE UŻYWAĆ W ODY ANI INNYCH PŁYNÓW.



Zgłaszanie skutków ubocznych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek skutki uboczne, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Obejmuje to również wszelkie możliwe skutki uboczne niewymienione w ulotce dołączonej do opakowania. Skutki uboczne można również zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem programu Yellow Card Scheme pod adresem: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Zgłaszając skutki uboczne, można pomóc w dostarczeniu dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa leku.

Orion Pharma (UK) Ltd,
Abbey Gardens,
4 Abbey Street,
Reading, RG1 3BA, UK



INSTRUKCJA WIDEO FILM DOTYCZĄCY SPOSOBU UŻYCIA EASYHALER

Aby obejrzeć film z instrukcjami, jak korzystać z wyrobu, należy zeskanować kod QR lub wejść na adres strony internetowej umieszczony na pudełku Easyhaler, w ulotce dołączonej do opakowania lub na etykiecie inhalatora.

W przypadku produktów Easyhaler, na których opakowaniu nie ma kodu QR ani adresu strony internetowej, należy odwiedzić stronę www.oeh.fi/uk, aby uzyskać dostęp do filmu wideo.