


CYFARWYDDIADAU AR GYFER DEFNYDDIO EICH EASYHALER®



I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio a storio Easyhaler® darllenwch daflen y pecyn.

SUT I DDECHRAU ARNI?


Darn y geg

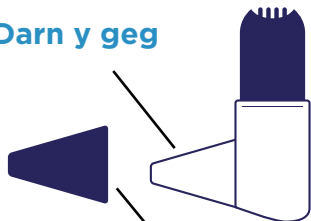

Cap llwch

- ▶ Daw pob dyfais Easyhaler® newydd mewn cwdyn ffoil i gadw'r powdr yn sych.
- ▶ Peidiwch ag agor y cwdyn nes eich bod yn barod i ddechrau defnyddio eich anadlydd Easyhaler®.
- ▶ Mae gan y ddyfais Easyhaler® ddarn ceg gyda chap llwch y gellid ei dynnu.
- ▶ Gwnewch yn siŵr fod y cap llwch yn gorchuddio darn ceg eich dyfais Easyhaler® pan nad ydych yn ei defnyddio. Bydd hyn yn atal unrhyw feddyginiaeth rhag cael ei rhyddhau'n ddamweiniol.

FIDEO CYFARWYDDIADAU EASYHALER®

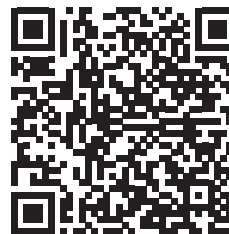


SGANIWCH FI

Sganiwch y cod QR ar y dudalen hon i wyllo'r fideo am sut i ddefnyddio Easyhaler®.

Gallwch hefyd ddod o hyd i godau QR ar ochr label eich dyfais Easyhaler®, ar garton y pecyn ac ar daflen y pecyn.


Fel arall, ewch i www.oeh.fi/uk i weld y cynnwys hwn.

SUT I GYMRYD DOS O'CH EASYHALER®?

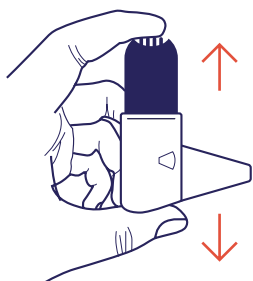


1. YSGWYDWCH

- ▶ Tynnwch y cap llwch.
- ▶ Rhowch yr anadlydd rhwng eich bys blaen a'ch bawd.
- ▶ **Ysgwydwch yr anadlydd** tra bydd ar ei sefyll 3-5 gwaith.

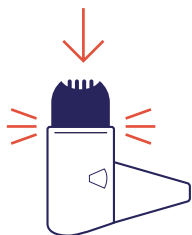

2. CLICIWCH


- ▶ **Pwyswch i lawr** nes byddwch yn clywed clic.
- ▶ Yna, gadewch iddo ddychwelyd i'w safle gwreiddiol.

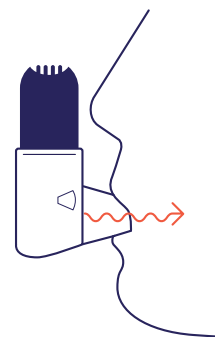

3. ANADLWCH I MEWN


- ▶ Anadlwch allan fel arfer i ffwrdd o'r ddyfais.
- ▶ Rhowch ddarn ceg yr anadlydd yn eich ceg, a chaewch eich gwefusau'n dynn o'i amgylch.
- ▶ **Anadlwch yn gryf ac yn ddwfn i mewn.**
- ▶ Tynnwch yr anadlydd o'ch ceg a daliwch eich anadl am o leiaf 5 eiliad.
- ▶ Anadlwch allan fel arfer.
- ▶ Os yw eich presgripsiwn yn gofyn i chi gymryd mwy nag un dos, dilynwch gamau 1 i 3 eto bob tro y byddwch yn defnyddio eich anadlydd. Pan fyddwch wedi gorffen, ailosodwch y cap llwch ar y darn ceg.
- ▶ Os yw eich dyfais Easyhaler® yn cynnwys corticosteroid (atalydd) sy'n cael ei anadlu i mewn, cofiwch olchi'ch ceg a'ch gwddf â dŵr, a'i boeri allan. Peidiwch â llyncu. Bydd hyn yn helpu i leihau'r risg o haint ffwngaid yn y geg (y llindag).

GORCHUDD AMDDIFFYNNOL

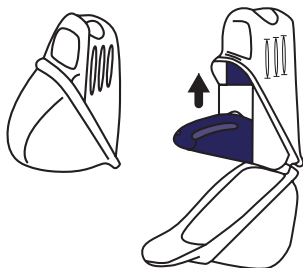


- ▶ Mae gorchudd amddiffynnol yn ddewisol. Agorwch y gorchudd amddiffynnol a rhwch yr anadlydd ynddo.
- ▶ Wrth ddefnyddio gorchudd amddiffynnol, agorwch y gorchudd a dilynwch y camau: **1. Ysgwydwch, 2. Cliciwch a 3. Anadlwch i Mewn**
- ▶ Gosodwch y cap llwch a chaewch y gorchudd ar y gorchudd amddiffynnol.

GLANHAU

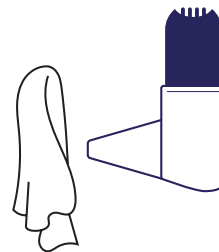

- ▶ Glanhewch y darn ceg â lliain neu hances sych a glân.
- ▶ Peidiwch â defnyddio dŵr na hylifau eraill i lanhau eich Easyhaler®. Gallai unrhyw beth gwlyb amharu ar y powdr y tu mewn i'ch anadlydd.
- ▶ Os ydych chi'n defnyddio gorchudd amddiffynnol, nid oes angen i chi dynnu'r anadlydd i lanhau'r darn ceg.

BETH I'W WNEUD PAN...

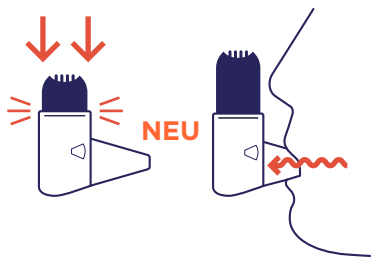


CLICIOCH CHI MWY NAG UNWAITH?

- ▶ A glicioch chi ar yr anadlydd yn ddamweiniol? Mae'n bwysig clicio unwaith yn unig er mwyn cael y dos cywir.

ANADLOCH CHI I MEWN I'R ANADLYDD?

- ▶ Anadloch chi **I MEWN** i'r anadlydd? Mae'n bwysig eich bod yn osgoi anadlu i mewn i geg yr anadlydd oherwydd gallai hyn rwystro'r anadlydd.

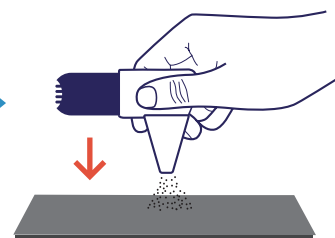


ATEB

GWAGIWCH Y DARN CEG!

- ▶ Tarwch y darn ceg i wagio'r powdr ar fwrdd neu gledr eich llaw.
- ▶ Yna, dechreuwch eto gyda'r camau: **1. Ysgwydwch, 2. Cliciwch a 3. Anadlwch i mewn.**

CAEL EASYHALER NEWYDD

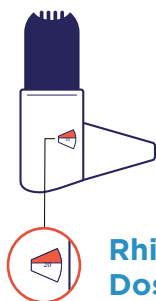

Rhifydd Dosau

- ▶ Mae gan yr anadlydd rifydd dosau ar yr ochr. Mae hwn yn dangos faint o ddosau sydd ar ôl yn eich dyfais.
- ▶ Mae'r rhifydd yn troi ar ôl pob 5ed dos ac mae'r nifer a ddangosir yn gostwng mewn unedau o 10.
- ▶ Pan fydd y rhifydd dosau yn troi'n goch, mae 20 dos ar ôl. Cysylltwch â'ch meddyg am bresgripsiwn newydd os nad oes gennych anadlydd newydd eisoes.
- ▶ **Pan fydd y rhifydd yn cyrraedd 0, bydd angen anadlydd arall arnoch chi.**
- ▶ Os ydych chi'n defnyddio gorchudd amddiffynnol, cadwch hwn i'w ddefnyddio gyda'ch anadlydd nesaf.

Os cewch unrhyw sgil-ffeithiau, siaradwch â'ch meddyg, fferylllydd neu nyrs. Mae hyn yn cynnwys unrhyw sgil-ffeithiau posibl nad ydynt wedi'u rhestru ar daflen y pecyn. Gallwch hefyd roi gwybod am sgil-ffeithiau yn uniongyrchol drwy'r Cynllun Cerdyn Melyn yn: www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Trwy adrodd am sgil-ffeithiau, gallwch chi helpu rhoi mwy o wybodaeth am ddiogelwch y feddyginiaeth.



Cynhyrchwyd y deunydd hwn drwy ddefnyddio papur wedi'i ailgylchu

January 2026/MAT-GB-EH-012026-0059

Orion Pharma (UK) Ltd, The Blade,
Abbey Square Reading, Berks, RG1 3BE

