


د EASYHALER® د لارښوونې ویدیو

د Easyhaler® کارولو څرنگوالي ویدیو لیدلو لپاره په دې پاڼه کې QR کوډ سکین کړئ.

تاسو کولای شئ د QR کوډونه د خپلې Easyhaler® وسیلې لیل په اړخ کې، د کڅورې په کارتن او د کڅورې په لارښود پاڼو کې هم ومومئ.


په بډیله توگه، د دې مینځپانگې لیدلو لپاره www.oeh.fi/uk ته مراجعه وکړئ.

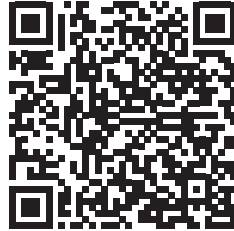

دا کوډ سکین کړئ

څنگه پیل وکړو؟


- هره نوي Easyhaler® وسیله په یوه ورقي یا فویلې کڅوره کې راځي تر څو پوډر وچ وساتي.
- کڅوره تر هغه وخته مه خلاصوئ تر څو چې تاسو د خپل Easyhaler® د ساه اخیستلو وسیلې کارولو ته چمتو نه یاست.
- د Easyhaler® وسیله د خولې یوه وسیله لري چې د لري کولو وړ دورو سرپوښ لري.
- ډاډ تر لاسه کړئ چې د نه کارولو پر مهال د دورو سرپوښ ستاسو د Easyhaler® وسیلې د خولې وسیله پوښي. دا به د هر ډول درملو په ناڅاپي ډول خپریدو مخه ونیسي.

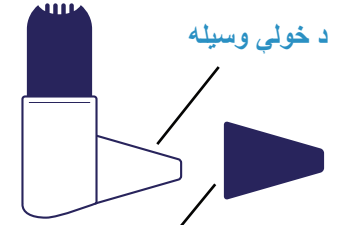

له EASYHALER® څخه د ډوز د کارولو څرنگوالی


۱. تکان ورکړئ

- د دورو سرپوښ لري کړئ.
- د ساه اخیستلو وسیله د خپلې اشارې او غټې گوتې ترمنځ کېږدئ.
- د ساه اخیستلو وسیله په مستقیم حالت کې ۳-۵ ځله وڅوځوئ.

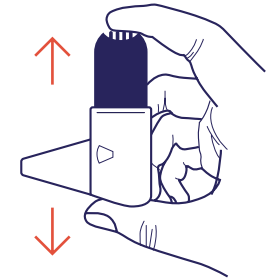


۲. کلیک

- تر هغه وخته پورې فشار ورکړئ چې تاسو د یوه کلیک غږ واورئ.
- بیا یې بیرته خپل اصلي حالت ته پریردئ.

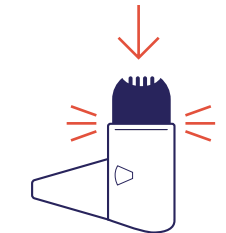


۳. ساه واخلي

- په عادي ډول د وسیلې څخه لري ساه بهر وباسئ.
- د ساه اخیستلو د وسیلې د خولې وسیله په خپله خوله کې کېږدئ، د خولې توتې شاوخوا خپلې شونډې په کلک ډول بندې کړئ.
- یوه پیاوړې او ژوره ساه واخلي.
- د ساه اخیستلو وسیله له خولې څخه وباسئ او لږ تر لږه د ۵ ثانیو لپاره ساه ونیسي.
- په عادي ډول ساه بهر وباسئ.
- که د نسخې له مخې تاسو اړ یاست چې له یوه څخه زیات ډوز (خوراک) واخلي، نو هر ځل چې تاسو خپله د تنفس وسیله کاروئ، له ۱ څخه تر ۳ پورې گامونه تکرار کړئ. کله چې تاسو کار بشپړ کړئ، د خولې وسیله باندې د دورو سرپوښ کېږدئ.
- که چېرې ستاسو Easyhaler® وسیله د تنفس له لارې کورټیکوسټیرایډ (مخنیوی کونکې) ولري، ډاډ تر لاسه کړئ چې خپله خوله او ستونی په اوبو سره ومینځئ او تویي کړئ. مه یې تیروئ. دا به د خولې د فنکسي انتان (په ژبې باندې د سپینو موادو) د خطر کمولو کې مرسته وکړي.

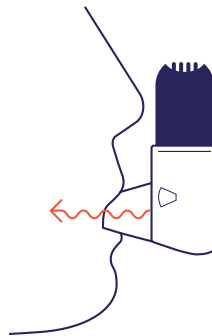


محافظتي پوښ

- محافظتي پوښ اختياري دی. محافظتي پوښ خلاص کړئ او د ساه اخیستلو وسیله پکې دننه کړئ.
- کله چې محافظتي پوښ کاروئ، پوښ خلاص کړئ او لاندې مرحلې تعقیب کړئ:
- ۱. ویی ښورئ، ۲. کلک وکړئ او ۳. ساه واخلي.
- د دورو سرپوښ بدل کړئ او بیا پوښ په محافظتي پوښ وتړئ.

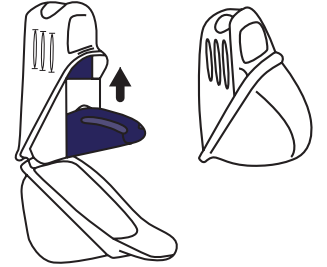

پاکول


- د خولي وسیله د پاک وچ توکر یا کاغذ سره پاکه کړئ.
- د خپل Easyhaler® د پاکولو لپاره اوبه یا نور مایعات مه کاروئ. کیدای شي ستاسو د ساه اخیستلو وسیلې دننه پودر د رطوبت په مقابل کې حساس وي.
- که چېرې تاسو د محافظتي پوښ څخه کار اخلئ، نو تاسو اړتیا نه لرئ چې د خولي توتې د پاکولو لپاره د ساه اخیستلو وسیله لرې کړئ.

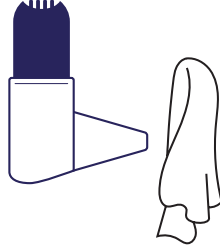

څه باید وکړو کله چې...

تاسو له یو ځل څخه ډیر کلک کړئ وي؟


- آیا تاسو په ناڅاپي ډول د ساه اخیستلو وسیله باندې کلک کړئ؟ د مناسب ډوز لپاره، دا مهمه ده چې یوازې یو ځل کلک وکړئ.
- تاسو د ساه اخیستلو په وسیله کې ساه بهر ایستلې وي؟
- آیا تاسو د ساه اخیستلو په وسیله کې دننه ساه بهر وویسته؟ دا مهمه ده چې تاسو د ساه اخیستلو وسیلې کې ساه ونه باسئ ځکه چې کیدای شي دا د ساه اخیستلو وسیله بنده کړي.

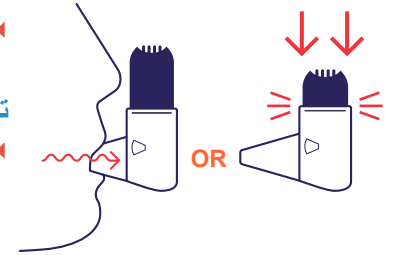

حل لاره


د خولي وسیله خالي کړئ!

- د خولي وسیله کپکړئ تر څو پودر په میز یا په ورغوي کې واچوئ.
- وروسته د لاندې گامونو سره یې بیا پیل کړئ:
- ۱. ویی ښورئ، ۲. کلک وکړئ او ۳. ساه واخلي.

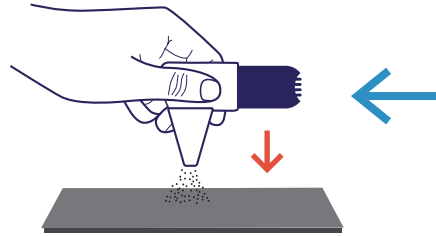

د نوي EASYHALER وسیلې ترلاسه کول

- د ساه اخیستلو وسیله په څنګ کې د ډوز شمېرونکی لري. دا ښيي چې ستاسو په وسیله کې څومره ډوزونه (خوراکونه) پاتې دي.
- د هرو ۵ ډوزونو (خوراکونو) وروسته شمېرونکی بدلېږي او ښودل شوي شمیر د ۱۰ واحدونو په اندازه کمېږي.
- کله چې د ډوز شمېرونکی سور شي، نو ۲۰ ډوزونه (خوراکونه) پاتې وي. که تاسو لا له مخکې نوې د ساه اخیستلو وسیله نه لرئ، نو د نوي نسخې لپاره له خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ.
- کله چې شمېرونکی ۰ ته ورسېږي، تاسو اړتیا لرئ چې د ساه اخیستلو وسیله بدله کړئ.
- که چېرې محافظتي پوښ کاروئ، نو مهرباني وکړئ دا د خپل راتلونکي ساه اخیستونکي وسیلې سره د کارولو لپاره وساتئ.

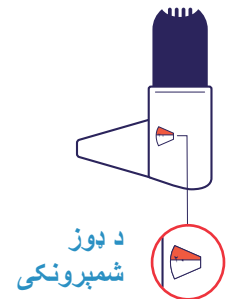

که تاسو کوم جانبي عوارض ولرئ، نو له خپل ډاکټر، درمل جوړونکي یا نرس سره خبرې وکړئ. په دې کې هر هغه احتمالي جانبي عوارض شامل دي چې د بستي په لارښود پانه کې ذکر شوي نه دي. تاسو کولای شئ د ژیر کارت طرحې (Yellow Card Scheme) له لارې هم په مستقیم ډول د جانبي عوارضو په اړه راپور ورکړئ: www.mhra.gov.uk/yellowcard. د جانبي عوارضو په اړه راپور ورکولو سره، تاسو کولای شئ د درملو د خونديتوب په اړه د نورو معلوماتو په چمتو کولو کې مرسته وکړئ.

جنوري ۲۰۲۶/0112/012026-EH-GB-MAT

دا مواد د بیا کارولو شوي کاغذ په کارولو سره تولید شوي دي

